

Oversigt over kontroller, der skal gennemføres på digitale røntgenanlæg.

### MÅNEDLIGE KONTROLLER

Konstanskontrollerne udføres af klinikken selv. De klinikker, som er digitaliseret og som sender deres billeder til KirPACS kan bede Kiropraktorernes Videnscenter kontrollere punkterne mærket med \* nedenfor (dette er en del af KirPACS abonnementet). Der skal dog gives besked til Kiropraktorernes Videnscenter, hvis man ønsker at gøre brug af dette. De resterende kontroller skal klinikken selv gennemføre og notere på skema 8.0d som findes i røntgenhåndbogen på [www.kiroviden.dk](http://www.kiroviden.dk).

- Rummelig opløsning (lp/mm)\*
- Lavkontrastopløsning (antal cirkler)\*
- Gennemsnitlig pixelværdi (høj og lav)\*
- Fortegning (ja/nej)\*
- Sammenfald af lys- og strålefelt (ja/nej)\*
- Billeddiagnostisk monitor (ja/nej)
- Nulstilling af billedplader (ja/nej) (*skal måske gøres oftere afhængigt af kassettetyper*)

### ÅRLIGE KONTROLLER

- Statuskontroller (*udføres af det firma, som klinikken har indgået aftale med*). Firmaet vil normalt fremsende kopi af kontrollen til Kiropraktorernes Videnscenter, men det er klinikken ansvar at sørge for, at dette sker.
- Kontrol af blygummimateriel (forklæder m.v.) (dette kontrolleres normalt af det firma, som klinikken har aftale med, i forbindelse med den årlige statuskontrol).

### PATIENTDOSISMÅLINGER

Patientdosismålingerne skal gennemføres, hvert andet år, medmindre andet er aftalt med røntgenanlæggets ansvarlige fysiker. Det firma, som klinikken har aftale med laver i forbindelse med statuskontrollen en opmåling af generatoren og klinikken udfylder skema 13.2 i røntgenhåndbogen, som findes på [www.kiroviden.dk](http://www.kiroviden.dk). Klinikken indsender skemaerne til Kiropraktorernes Videnscenter når de er udfyldt.

### MODTAGEKONTROL

Modtagekontrol gennemføres af firmaet ved installation af røntgenanlæg (eller dele heraf). Firmaet vil normalt fremsende kopi af kontrollen til Kiropraktorernes Videnscenter B, men det er klinikken ansvar at sørge for, at dette sker.