



## Eksport af undersøgelse fra Xero som zip fil

Først åbnes undersøgelsen i Xero via patient id link i KirPacs.


Herefter klikkes på de 3 små prikker ... som åbner menu. Nederst i menuen klikkes på Export DICOM

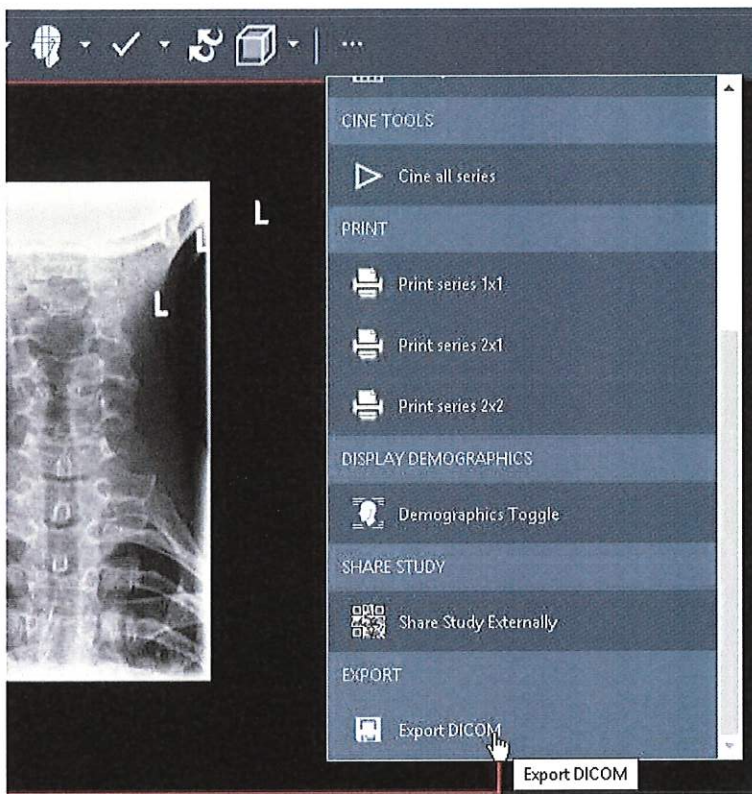

I Export DICOM menuen får man mulighed for at lave en adgangskode, således at undersøgelsen ikke vil kunne åbnes med mindre man angiver denne kode.

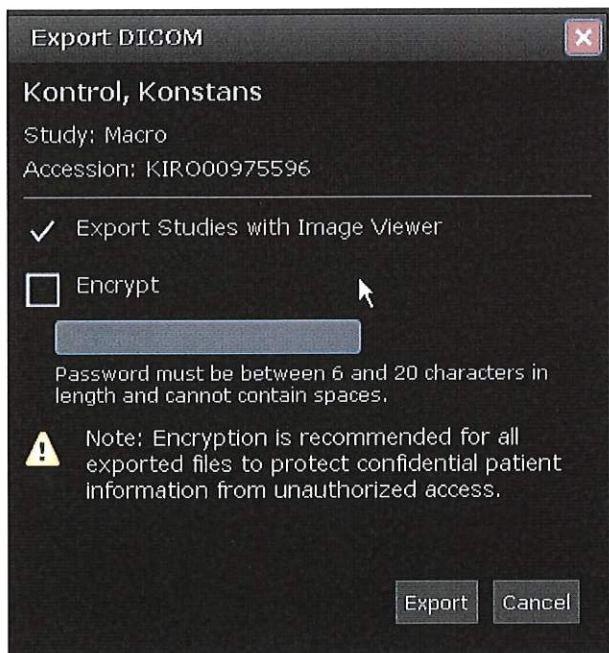


Når der klikkes på Export vil undersøgelsen blive eksporteret til computeren og kan findes under Downloads (placering afhænger af browser – nedenfor er vist Google Chrome)

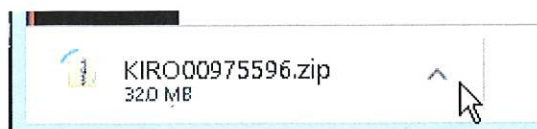


## Zip filens indhold og udpakning

Undersøgelser som eksporteres fra Xero gemmes i en Zip fil, som indeholder alle undersøgelsens billeder inklusive en viewer, som gør det muligt at se billederne.


Denne zip fil kan om nødvendigt udpakkes til en CD rom eller til et USB.

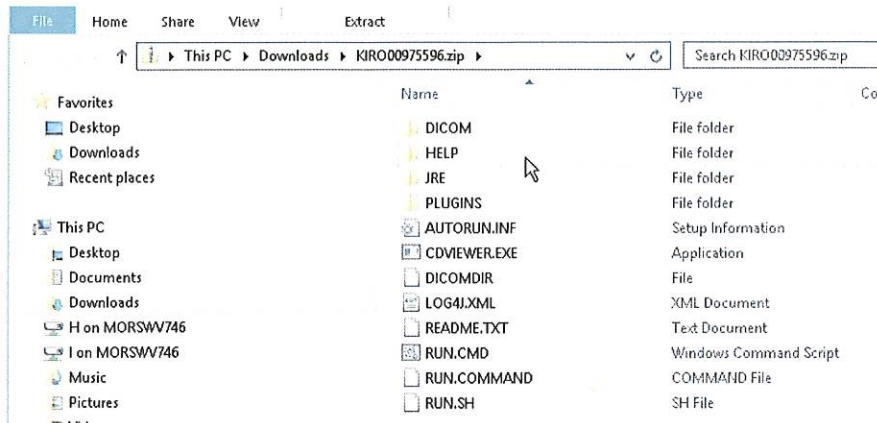

Vælg Udpak alle (Extract all)

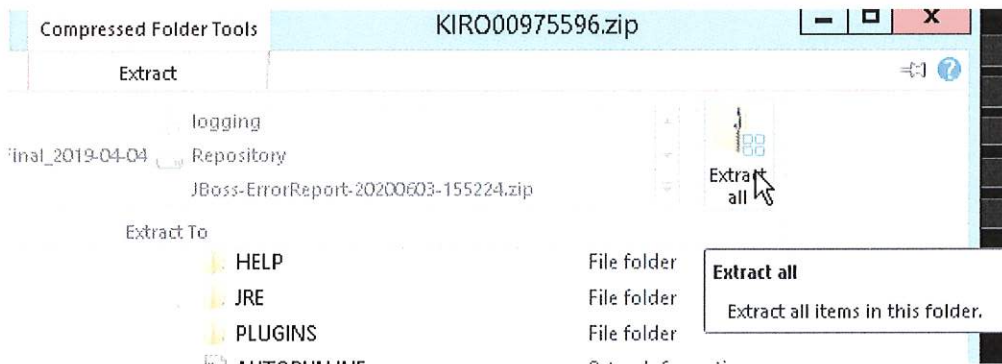

Vælg placering af CD rom eller USB

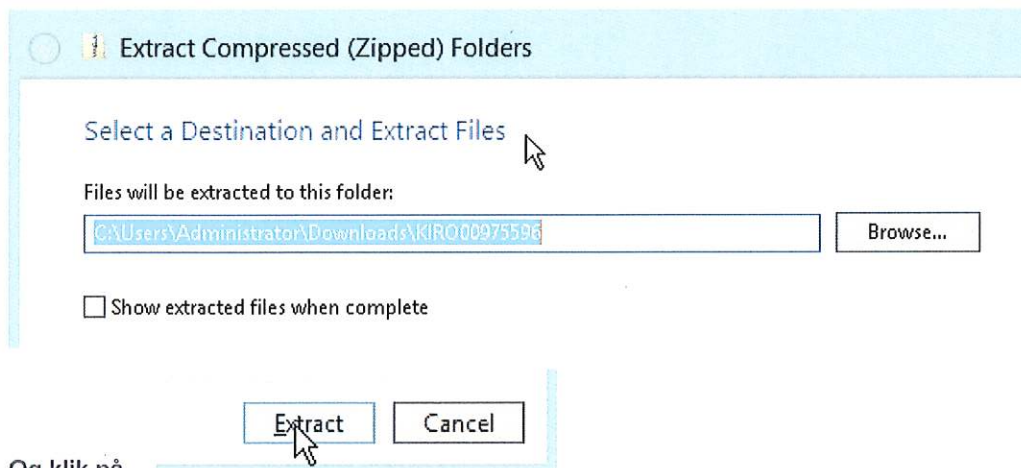

Og klik på