

Checkliste til brug for tilslutning af røntgenanlæg til KirPACS

Der henvises til Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside, hvor der er listet certificerede it-leverandører, der alle kan koble klinikkens røntgenanlæg op til KirPACS.

1. Administrator userid og password til modaliteten skal være tilgængelig. Log-on bør testes.
2. Det skal være muligt at installere ekstra software på modalitetsmaskinen. Et alternativ er, at en anden maskine med fast ip-adresse stilles til rådighed, f.eks. en server.
3. Maskinerne i behandlerrummene skal enten have fast ip-adresse eller kunne kaldes ved hjælp af deres DNS-navn.
4. User id og password til administratorkontoen på disse maskiner skal være tilgængelig, således at firewall'en kan tilpasses. Log on bør testes.
5. Klinikken skal have adgang til internettet – en 20/10 Mbit hastighed anbefales.

Ad 1) Forskel på almindelig log on og administrator login er, at man som administrator kan tilføje nye AE Titler på modaliteten.

Ad 2) Administrator adgang testes ved at vælge Start – Indstillinger – Kontrol Panel – Windows firewall. Hvis man i undtagelser kan tilføje og rette, har man administrator adgang.